



SPECTRUM DNA™

A Division of SPECTRUM SOLUTIONS, LLC



SDNA - 1000

2mL Saliva Collection Device - Instructions For Use (IFU)

For use under an emergency use authorization (EUA) only.



Do NOT eat, drink, smoke, or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.



NO coma, beba, fume ni mastique chicle 30 minutos antes de dar su muestra de saliva.



ÉVITER de manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum pendant 30 minutes avant de donner un échantillon de votre salive.

STEP 1



Fill the tube with saliva to the black wavy line. Fill the tube until your saliva (not including bubbles) is at or just above the wavy line. **DO NOT OVERFILL.**

Llene el tubo con saliva hasta la línea negra ondulada. Llene el tubo hasta que su saliva (sin considerar las burbujas) alcance o se encuentre justo sobre la línea ondulada. **NO LO LLENE EN EXCESO.**

Remplir le tube de votre salive jusqu'à la ligne ondulée noire. Remplir le tube jusqu'à ce que votre salive (sans compter les bulles) atteigne au moins la ligne ondulée. **ÉVITER LES DÉBORDEMENTS.**

STEP 2




Replace the funnel with the fluid cap. Remove the funnel from the tube. Screw on the enclosed cap **TIGHTLY** to release the solution that will stabilize the DNA in your saliva.

Reemplace el embudo por la tapa del líquido. Extraiga el embudo del tubo. Enrosque **FUERTEMENTE** la tapa adherida para liberar la solución que estabilizará el ADN en su saliva.

Remplacer l'entonnoir par le bouchon. Enlever l'entonnoir du tube. Visser **FUERTEMENTE** le bouchon fourni pour libérer la solution qui stabilisera l'ADN dans votre salive.

STEP 3

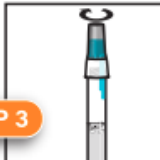

Firmly screw cap down to release solution and seal tube. You will know it works when the blue solution from the cap is released into the tube. Firmly tighten cap to assure the cap and tube is completely sealed.

Enrosque con firmeza la tapa hacia abajo para liberar la solución y sellar el tubo. Sabrá si funciona cuando la solución azul de la tapa se libere en el tubo. Enrosque con firmeza para asegurarse de que la tapa y el tubo estén totalmente sellados.

Visser fermement le bouchon en poussant vers le bas pour libérer la solution et fermer le tube. Vous saurez que cela aura fonctionné une fois que la solution bleue du bouchon aura été libérée dans le tube. Serrer fermement le bouchon pour assurer une fermeture bien étanche.

STEP 4



Shake the tube for at least five seconds. This will ensure your sample mixes thoroughly with the stabilizing solution.

Agite el tubo al menos cinco segundos. Esto garantizará que su muestra se mezcle bien con la solución estabilizante.

Secouer le tube pendant au moins cinq secondes. Ceci permettra de bien mélanger votre échantillon avec la solution stabilisante.